


SLiM

ЖЕСТКИЕ ГЛАДИЛКИ
С ТОНКИМ КОНЧИКОМ

Инструменты с тонкими гладилками SLiM предназначены для выполнения деликатных реставрационных манипуляций.

Компания FABRI при производстве постаралась обеспечить баланс между толщиной, прочностью и эластичностью гладилок.

Однако, как и любое другое миниатюрное изделие данный инструмент требует деликатного обращения в процессе использования. Пожалуйста, соблюдайте простые правила и получайте удовольствие от работы инструментами FABRI!

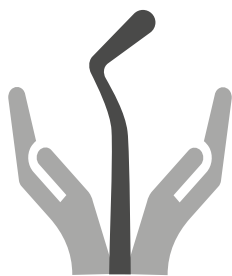

Гладилки SLiM требуют особо бережного отношения*



Не роняйте инструменты!



Не используйте гладилки FABRI в качестве коронкоснимателя



Не нагревайте инструменты на открытом пламени спиртовой горелки!



Для извлечения материала рекомендуется НЕ погружать кончик гладилки в шприц, а «срезать» предварительно выдавленную порцию материала.



При извлечении инструмента из стерилизационного пакета не пытайтесь «прорвать» кончиком гладилки пленку или бумагу. Вскрывайте пакеты, используя специальный клапан или ножницы.

* На гладилки SLiM не распространяются гарантии производителя в случае поломки рабочей части в процессе использования инструмента!

FABRI
DENTAL INSTRUMENTS