

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

FABRI
DENTAL INSTRUMENTS



БЕРЕЖНО ОБРАЩАЙТЕСЬ С ИНСТРУМЕНТАМИ

Укладывайте инструменты осторожно, не бросайте. Старайтесь при обработке не допускать касаний инструментов друг друга. Рекомендуется использовать кассеты. ЗАПРЕЩЕН контакт с ортофосфорной кислотой (протравкой), йодом!



НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ ВЕСЬ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ

Все новые инструменты перед первым использованием обязательно должны пройти весь процесс обработки аналогично инструментам, бывшим в работе. Новые инструменты для сохранности при хранении обрабатываются производителем консервационными антикоррозионными средствами, которые необходимо удалить.



НЕМЕДЛЕННО УДАЛЯЙТЕ ГРУБЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ


Грубые загрязнения (кровь, пломбировочные материалы, кислотные очистители и травители и т.д.) удаляйте сразу после использования инструментов (НЕ ПОЗДНЕЕ 2-х часов) при помощи мягкой щетки или ткани.



МЕТАЛЛ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ И АБРАЗИВЫ

Для очистки инструментов ЗАПРЕЩЕНО использовать металлические щетки, губки, наждачную бумагу и абразивные чистящие вещества ("Пемолукс" и т.д.).

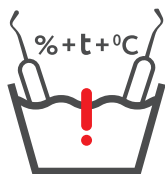


СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ КОНЦЕНТРАЦИЮ, ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ И ТЕМПЕРАТУРУ МОЮЩЕГО РАСТВОРА

УБЕДИТЕСЬ, что моющее средство предназначено для инструментов из нержавеющей стали. СТРОГО следуйте рекомендациям производителя в части концентрации, времени обработки и температуры. Для приготовления раствора используйте ТОЛЬКО дистиллированную воду! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО оставлять инструменты под воздействием раствора на ночь или на выходные дни! ЗАПРЕЩЕНО использовать растворы, содержащие: сильные щелочи (> pH 9); сильные кислоты (< pH 4); фенолы и йодофоры; сильные окислители/перекиси; органические растворители, альдегид, спирт!



ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫВАЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ И ВЫСУШИВАЙТЕ ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ

Извлекая инструменты из моющего раствора, тщательно промойте их в дистиллированной водой и высушите. При использовании водопроводной воды ОБЯЗАТЕЛЬНО ополосните их в дистиллированной для удаления солей и примесей. Рекомендуется сушка чистым сжатым воздухом.

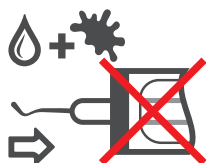

СТЕРИЛИЗУЙТЕ ТОЛЬКО СУХИЕ И ВИЗУАЛЬНО ЧИСТЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инструменты, прошедшие мойку, перед упаковкой в крафт пакеты должны быть АБСОЛЮТНО сухими и ВИЗУАЛЬНО чистыми (без остатков крови, пломбировочных материалов и т.д.). При обнаружении следов загрязнений повторите процедуры очистки и мойки.



НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА СО РЖАВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

На всех этапах обработки НЕ ДОПУСКАЕТСЯ контакт неповрежденных инструментов с ржавыми. Ржавые инструменты следует немедленно отсортировать, чтобы не заразить коррозией остальные инструменты.



ПАРОВАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ – ПОВЫШЕННАЯ ГАРАНТИЯ СОХРАННОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ!

Автоклав с температурным режимом 134 °C - предпочтительный метод стерилизации в части сохранности инструментов. Используйте в автоклаве только дистиллированную воду. Во избежание коррозии вследствие электролиза, не кладите вместе инструменты из нержавеющей стали с изделиями из алюминия, латуни, меди. ЗАПРЕЩЕНО использовать гласперленовые стерилизаторы.